

Cast-To-Gold

הנחיות עבודה



דגשים חשובים בעבודה עם מבנים מסוג Cast-To-Gold
מבית Zimmer Biomet:

1. היציקה חייבת להיות ממתכת אצילה או חצי אצילה.
2. יש לשמור על מערכת חימום מכוילת ולעבוד בטמפרטורות הנכונות לכל שלב.
 - שלב היציקה לזהב - טמפרטורה מקסימלית 1388°C .
 - שלב השריפה - טמפרטורה מקסימלית 815°Cמשך העבודה בשלב זה לא יעלה על שעה.
3. ניקוי המבנה לאחר העבודה - יש לשמור לא לשייף או להחליק את החלק המקורי של המבנה (הוא מגיע לא מוחלק), וזאת על מנת לא לפגוע ב-Friction fit.

